




PLAN DE PRIM AJUTOR ÎN CAZUL ACCIDENTELOR OCULARE plum

SUBSTANȚE CONTAMINANTE	CLĂTIRE RECOMANDATĂ	CLĂTIRE ÎN CONTINUARE	TIMP RECOMANDAT PENTRU CLĂTIRE
Corpuri străine praf, funingine, aşchii din lemn si metal	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul până când contaminările vor fi eliminate complet.
Substanță acidă	pH Neutral	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, după care continuați cu Soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină fi ziologică), până ajungeți la medic.
Substanță alcalină	pH Neutral	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, după care continuați cu Soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină fi ziologică), până ajungeți la medic.
Alte substanțe chimice	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul până ajungeți la medic.

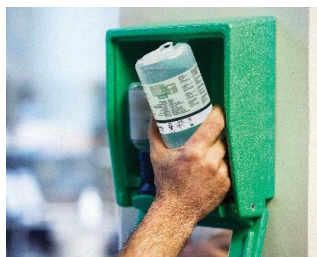


Soluția pentru clătirea ochilor Plum se folosește simplu în cazul accidentelor oculare.



Răsuciți capacul în direcția indicată de săgeată până când se rupe sigiliul.



Aplecați-vă în spate, presăți flaconul și începeți clătirea.

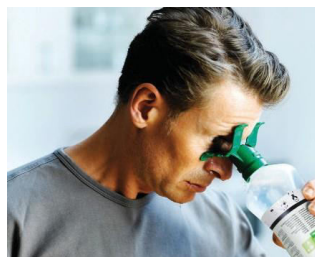

După aceea ochiul poate fi clătit și dacă vă aplecați puțin în față.

IMPORTANT!

Asigurați-vă întotdeauna că soluția pentru clătirea ochilor intră în ochi în forma unui jet constant.

În cazul în care ambii ochi au fost afectați în accident, utilizați soluția DUO pentru clătirea ochiului.